



AcrySof® IQ PanOptix®
PRESBYOPIA-CORRECTING IOL



AcrySof® IQ PanOptix® Toric
PRESBYOPIA-CORRECTING IOL

Chirurgiczna korekcja wzroku z

AcrySof® IQ PanOptix®

Zyskaj niezależność
od okularów



Alcon




Mój wzrok


Oczy odbierają obraz świata, skupiając światło. Światło przedostaje się do oczu przez rogówkę i przechodzi przez soczewkę, dzięki której skupiane jest na siatkówce.²

Z upływem czasu soczewka może utracić elastyczność i zdolność do skupiania światła. Może to doprowadzić do niewyraźnego widzenia i konieczności noszenia okularów.³

OKO Z SOCZEWKĄ
SKUPIAJĄCĄ ŚWIATŁO
NA SIATKÓWCE

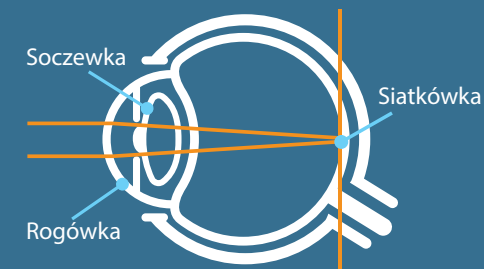

Z UPŁYWEM CZASU SOCZEWKA
MOŻE UTRACIĆ ELASTYCZNOŚĆ
I ZDOLNOŚĆ DO SKUPIANIA
ŚWIATŁA POCHODZĄCEGO
Z BLISKICH ODLEGŁOŚCI.

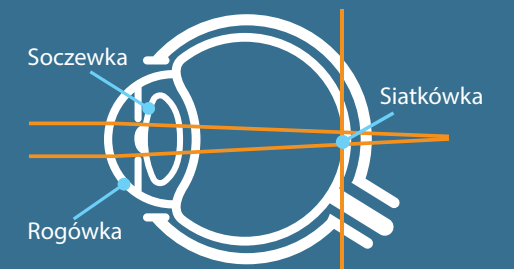

Czym jest chirurgiczna korekcja wzroku

(zwana także refrakcyjną wymianą soczewki)?

Refrakcyjna wymiana soczewki (RLE), znana także jako wymiana soczewki przezrzystej na soczewkę wewnątrzgałkową to zabieg chirurgiczny stosowany w celu skorygowania zaburzeń refrakcji wpływających na jakość widzenia, nawet jeśli pacjent nie ma jeszcze zaćmy.⁴

Czy jestem kandydatem do RLE?

Każdy pacjent z zaburzeniami ostrości widzenia może skonsultować ze swoim lekarzem możliwość refrakcyjnej wymiany soczewki.

Korzyścią dodatkową związaną z poddaniem się temu zabiegowi jest uniknięcie zabiegu operacji zaćmy w przyszłości. Wynika to z faktu, że RLE jest takim samym zabiegiem jak operacja zaćmy, w trakcie którego soczewka naturalna zostaje zastąpiona sztuczną soczewką wewnątrzgałkową.⁴ Podobnie jak w przypadku każdego zabiegu chirurgicznego, z zabiegiem RLE są związane pewne zagrożenia, o których należy porozmawiać z okulistą.

Jakich efektów mogę się spodziewać po RLE

Ostrość i jakość widzenia po operacji oraz dalsza konieczność noszenia okularów **zależy w dużej mierze od rodzaju wybranej soczewki.**⁵ Dlatego tak ważne jest, aby przed operacją porozmawiać z lekarzem o możliwościach jakie dają soczewki wieloogniskowe. Wybór soczewki powinien być dokonany na podstawie aktywności i stylu życia pacjenta oraz jego oczekiwań dotyczących jakości widzenia po zabiegu.





Co mogę
zyskać
wybierając
soczewkę
wieloogniskową

Rodzaje soczewek

AcrySof IQ
ASPHERIC IOL



Soczewka jednoogniskowa: z filtrem światła niebieskiego

Wykonana z hydrofobowego materiału AcrySof®, posiadająca filtr UV oraz filtr światła niebieskiego. Wyjątkowość w projekcie soczewki zapewnia jej stabilność po implantacji. Soczewka z jednym punktem ogniska, zapewnia widzenie dali oraz dzięki asferycznej optyce oferuje polepszoną jakość obrazu.

AcrySof IQ Toric
ASTIGMATISM-CORRECTING IOL



Soczewka jednoogniskowa: do korekcji astygmatyzmu

Wykonana z hydrofobowego materiału AcrySof®, posiadająca filtr UV oraz filtr światła niebieskiego. Wyjątkowość w projekcie soczewki zapewnia jej stabilność po implantacji. Soczewka z jednym punktem ogniska, zapewnia widzenie dali oraz dzięki asferycznej optyce oferuje polepszoną jakość obrazu. Rekomendowana do korekcji wzroku u pacjentów, u których równocześnie występują zaćma i astygmatyzm.

AcrySof IQ PanOptix®
PRESBYOPIA-CORRECTING IOL



Soczewka wieloogniskowa: trójogniskowa

Wykonana z hydrofobowego materiału AcrySof®, posiadająca filtr UV oraz filtr światła niebieskiego. Wyjątkowość w projekcie soczewki zapewnia jej stabilność po implantacji. Soczewka z wieloma punktami ogniska, dzięki asferycznej optyce zapewnia polepszoną jakość obrazu. Zaprojektowana do korekcji starczowzroczności (prezbiopii) w celu zapewnienia pełnego zakresu widzenia – bliży, dali i odległości pośredniej. Doskonałe rozwiązanie dla pacjentów korzystających na co dzień z komputera lub laptopa.

AcrySof IQ PanOptix® Toric
PRESBYOPIA-CORRECTING IOL



Soczewka wieloogniskowa: trójogniskowa do korekcji astygmatyzmu

Wykonana z hydrofobowego materiału AcrySof®, posiadająca filtr UV oraz filtr światła niebieskiego. Wyjątkowość w projekcie soczewki zapewnia jej stabilność po implantacji. Soczewka z wieloma punktami ogniska, dzięki asferycznej optyce zapewnia polepszoną jakość obrazu. Zaprojektowana do korekcji starczowzroczności (prezbiopii) w celu zapewnienia pełnego zakresu widzenia: bliży, dali i odległości pośredniej. Dodatkowo koryguje astygmatyzm. Doskonałe rozwiązanie dla pacjentów z astygmatyzmem korzystających na co dzień z komputera lub laptopa.



Soczewki AcrySof® IQ PanOptix®

AcrySof® IQ PanOptix® oraz PanOptix® Toric to soczewki wewnątrzgałkowe, które zapewniają lepsze widzenie w trzech odległościach:

- bliży (40 cm)
- odległości pośredniej (60cm)
- dali

bez konieczności noszenia okularów.^{1,6-12} Ponieważ soczewki wewnątrzgałkowe AcrySof® IQ PanOptix® i PanOptix® Toric zapewniają ostrość widzenia we wszystkich trzech niezbędnych do normalnego funkcjonowania odległościach, są one często nazywane soczewkami trójogniskowymi.

Dlaczego mój chirurg rekomenduje soczewkę wewnątrzgałkową AcrySof® IQ PanOptix®?

Chirurg rekomenduje AcrySof® IQ PanOptix®, ponieważ soczewka ta pozwala wyeliminować noszenie okularów po zabiegu refrakcyjnej wymiany soczewki czy zabiegu usunięcia zaćmy zapewniając dobre widzenie na bliskie, dalekie i pośrednie odległości.^{1,6-12} Soczewka wewnątrzgałkowa PanOptix® zapewnia komfortowe widzenie w odległościach pośrednich (60 cm) bez użycia okularów.⁹ Jak pokazują badania, odległość 60 cm jest naturalną odległością, której używamy do pracy przy komputerze.¹³⁻¹⁶

Na co zwrócić uwagę dobierając odpowiednią soczewkę:



Aktywności
wykonywane
z bliskich
odległości



Aktywności
wykonywane
z pośrednich
odległości



Aktywności
wykonywane
z dalekich
odległości

- ☐ Czy jesteś aktywny i uprawiasz sport?
- ☐ Czy często korzystasz z komputera lub tabletu?
- ☐ Czy jesteś "molem książkowym"?



jak przygotować się do zabiegu RLE

- ☐ Przez 3 tygodnie przed zabiegiem nie wolno nosić twardych soczewek kontaktowych. Przez 1 tydzień przed zabiegiem należy unikać miękkich soczewek kontaktowych.
- ☐ Dzień przed zabiegiem należy poinformować lekarza o złym samopoczuciu, ponieważ może zająć konieczność przełożenia terminu zabiegu.
- ☐ W dniu zabiegu nie należy nakładać makijażu na twarz i malować oczu.
- ☐ Należy zabrać ze sobą osobę towarzyszącą lub poprosić kogoś o odebranie z ośrodka, ponieważ samodzielne prowadzenie pojazdu nie będzie możliwe.
- ☐ Należy spożywać regularne posiłki dzień przed zabiegiem, o ile lekarz nie poprosi o dłuższą przerwę.

Imię i nazwisko lekarza: _____

Wizyta kontrolna: _____

Informacje po zabiegu: _____

Notes

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Dalsze kroki po zabiegu RLE:

- Przestrzegaj wszystkich zaleceń lekarza
- Po zabiegu mogą pojawić się objawy Zespołu Suchego Oka m.in.:
 - Podrażnienie
 - Uczucie piasku pod powiekami
 - Kłucie
 - Łzawienie
 - Zamazanie widzenia
 - Zmęczenie oczu
 - Pieczenie

Objawy zespołu suchego oka łagodzą się stosując odpowiednie krople nawilżające

Alcon

- Czasami po zabiegu może wystąpić początkowa nadwrażliwość na światło i początkowy zauważalny efekt rozproszenia światła.

Zjawisko to ma prawo występować po wszystkich zabiegach mających na celu usunięcie wady wzroku, w tym po zabiegach podczas których wszczepiana jest soczewka trójogniskowa. Zjawisko ma charakter przejściowy i odwracalny.

NA DZIEŃ



SYSTANE® HYDRATION

Krople SYSTANE® HYDRATION łagodzą objawy takie jak kłucie, pieczenie i uczucie piasku pod powiekami. Dzięki odpowiednio dobranym składnikom łączą się z naturalnymi łzami, w wyniku czego, tworzą na powierzchni oka żelowy opatrunek.

- Szybko i trwale łagodzą objawy suchego oka o umiarkowanym i dużym nasileniu.

- Mogą być stosowane również w trakcie noszenia soczewek kontaktowych.
- Mają dodatkowy efekt nawilżający dzięki formule o potrójnym działaniu.
- Czas przydatności do użycia do 3 miesięcy od otwarcia opakowania.

NA DZIEŃ



NOWOŚĆ!

SYSTANE® COMPLETE

Najnowocześniejsze i najbardziej kompleksowe krople z rodziny SYSTANE®. Dzięki unikalnej formule nanoemulsji zalecane jako pierwszy wybór do stosowania przy każdym typie zespołu suchego oka.

- Skutecznie i na długo łagodzą objawy suchego oka bez względu na ich przyczynę.

- Kompleksowo chronią wszystkie warstwy filmu łzowego, dając przedłużony efekt nawilżający.
- Czas przydatności do użycia do 3 miesięcy od otwarcia opakowania.

Alcon

Soczewki wewnątrzgałkowe AcrySof® IQ PanOptix® korygujące starczowzroczność

Ważne informacje o produkcie

WSKAZANIA: Soczewka wewnątrzgałkowa AcrySof® IQ PanOptix® wskazana jest do pierwotnego wszczepiania do torebki soczewki do komory tylnej w celu korekcji bezsoczewkowości będącej następstwem usunięcia zmętniałej lub przezierniej soczewki u pacjentów dorosłych z lub bez starczowzroczności, dla których pożądane jest widzenie bliży, odległości pośredniej i dali oraz zwiększona swoboda widzenia bez okularów.

OSTRZEŻENIA: Podobnie jak w przypadku każdego zabiegu chirurgicznego, z operacją tą są związane pewne zagrożenia. Chirurg powinien wykorzystać szczegółową ocenę przedoperacyjną i prawidłową ocenę kliniczną. Jest to szczególnie istotne w przypadku pacjentów, u których występuje którykolwiek ze stanów opisanych w informacjach dla lekarzy dotyczących soczewek wewnątrzgałkowych AcrySof® IQ PanOptix®. U niektórych pacjentów, w związku z budową soczewki wieloogniskowej, mogą wystąpić zaburzenia widzenia i/lub trudności w widzeniu, zwłaszcza w warunkach zmniejszonego oświetlenia. Podobnie jak w przypadku innych wieloogniskowych soczewek wewnątrzgałkowych, objawy związane ze wzrokiem mogą być na tyle poważne, że pacjent zażąda usunięcia soczewki wewnątrzgałkowej AcrySof® IQ PanOptix®. Zmętnienie torebki tylnej (PCO) może znacząco wpłynąć na wzrok pacjentów z wieloogniskowymi soczewkami wewnątrzgałkowymi, przy czym progresję obserwuje się szybciej niż u pacjentów z jednoogniskowymi soczewkami wewnątrzgałkowymi.

UWAGA: Pełną listę wskazań, ostrzeżeń i środków ostrożności można znaleźć w instrukcji użycia soczewki symbol TFNT00.

PIŚMIENICTWO:

1. Garcia-Perez JL, et al. Short term visual outcomes of a new trifocal intraocular lens. BMC Ophthalmology. 2017;17:72. 2. American Optometric Association. How Your Eyes Work. Available at: <https://www.aoa.org/patients-and-public/resources-for-teachers/how-your-eyes-work>. Accessed August 26, 2018. 3. National Eye Institute. Facts about presbyopia. Available at: <https://nei.nih.gov/health/errors/presbyopia>. Accessed August 26, 2018. 4. Alio JL. Cataract surgery with femtosecond lasers. Saudi Journal of Ophthalmology. 2011;25: 219–223. 5. Zvorničanin J and Zvorničanin E. Premium intraocular lenses: The past, present and future. Journal of Current Ophthalmology. 2018;1-10. 6. AcrySof® IQ PanOptix® IOL Directions for Use. 7. AcrySof® IQ PanOptix® Toric IOL Directions for Use. 8. Lawless M, et al. Visual and refractive outcomes following implantation of a new trifocal intraocular lens. Eye and Vision. 2017;4:10. 9. Gundersen KG and Potvin R. Trifocal intraocular lenses: a comparison of the visual performance and quality of vision provided by two different lens designs. Clin Ophthalmol. 2017;11:1081-1087. 10. Ruiz-Mesa R, et al. A comparative study of the visual outcomes between a new trifocal and an extended depth of focus intraocular lens. Eur J Ophthalmol. 2018; 28(2):182-187. 11. Monaco G, et al. Visual performance after bilateral implantation of 2 new presbyopia-correcting intraocular lenses: trifocal versus extended range of vision. J Cataract Refract Surg. 2017;43(6):737-747. 12. Alcon Data on File. TDOC-0053776. 16 Jan 2018. 13. Average of American OSHA, Canadian OSHA and American Optometric Association Recommendations for Computer Monitor Distances. Available at: https://www.osha.gov/SLTC/etools/computerworkstations/components_monitors.html. Accessed August 11, 2018. 14. Plagenhoef S, et al. Anatomical data for analyzing human motion. Res Q Exerc Sport. 1983;54:169-178. 15. What is the average male height? Average Height. Available at: <http://www.averageheight.co/average-male-height>. Accessed Aug 10, 2018. 16. Charness N, et al. Monitor viewing distance for younger and older workers. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society 52nd Annual Meeting, 2008. Available at: http://www.academia.edu/477435/Monitor_Viewing_Distance_for_Younger_and_Older_Workers. Accessed August 11, 2018. 17. Cummings A, et al. Wellington Eye Clinic. Refractive Treatment Booklet. 2018; 1-20.

Alcon Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, Polska, tel.: +48 22 820 34 50

PL-ACP-2000003



AcrySof® IQ PanOptix® Toric
PRESBYOPIA-CORRECTING IOL



AcrySof® IQ PanOptix®
PRESBYOPIA-CORRECTING IOL